

Урологическое исполнение аппаратов ударно-волновой терапии Gymna Shockmaster 300, Shockmaster 500:



Области применения в урологии и комплектация аппарата:

- Лечение эректильной дисфункции:

Используется урологическая головка глубокого воздействия. Воздействие идёт вдоль всего полового члена. Параметры процедуры автоматически подбираются аппаратом в зависимости от состояния пациента. Врач на своё усмотрение может менять параметры исходя из своего опыта. Начиная с третьей процедуры рекомендуется добавить воздействие виброголовкой D-Actor II 20 мм (максимум 500 ударных импульсов. Как завершающий этап процедуры).



Болезнь Пейрони (искривление полового члена):

Используется урологическая головка мягкого воздействия (фокусирующая головка). Воздействие идёт непосредственно на область искривления (фиброзную бляшку) и вокруг неё. Параметры процедуры подбираются индивидуально для каждого пациента.

Использование головки мягкого воздействия и правильная техника проведения процедуры позволяют увидеть результат (размягчение фиброзной бляшки) уже после 1-2 процедуры.



- ХТБС (Хронический тазовый болевой синдром);

В зависимости от локализации используются либо урологическая головка мягкого воздействия, либо урологическая головка глубокого воздействия. В случае неврологической составляющей так же используется виброголовка D-Actor II 20 мм.

При необходимости проводится обучение работе на аппарате урологом со стажем работы в урологии именно на аппаратах УВТ серии Shockmaster.



Аппарат ударно-волновой терапии Gymna Shockmaster 300:

Портативный немецкий аппарат ударно-волновой терапии высокого уровня:

- Мощность и эффективность на уровне стационарных аппаратов.
- Полная функциональность аппарата уже в базовой комплектации.
- Стойкий эффект и долговременность удержания полученных результатов лечения
- Альтернатива хирургическому лечению

Встроенный воздушный компрессор на 7 бар (max)

позволяет поддерживать максимальное давление во всем рабочем диапазоне частот (**самый мощный портативный аппарат на рынке УВТ**, с характеристиками и эффективностью на уровне стационарных моделей), что позволяет достигать стабильно высоких результатов от проведенных процедур во всем диапазоне устанавливаемых параметров.

Единственная в мире серия аппаратов с автоматической подстройкой параметров процедуры

в зависимости от болезненных ощущений пациента перед процедурой. Это позволяет экономить время врача и делает проведение процедуры простой и эффективной как для начинающих специалистов в области УВТ так и для опытных специалистов.

За счет поставляемого с 2020 года стандартного аппликатора “short” **давление выставляется с 0,3 бара** улучшается переносимости пациентами процедуры в «начальный» период.

Программное обеспечение Gymna GTS 2 на русском языке:

встроенные программы по заболеваниям с предустановленными параметрами процедуры и подробным поэтапным описанием проведения. Возможность выбора программ по частям тела, по типу обрабатываемой ткани (мышцы, сухожилия и т.д.), отдельные программы для триггерных точек с поэтапным описанием, урологии и т.д.



Аппарат ударно-волновой терапии Gymna Shockmaster 500:

Аппарат ударно-волновой терапии экспертного уровня. Самый мощный и эффективный аппарат радиальной ударно-волновой терапии на рынке.

- Увеличение потока пациентов и спектра оказываемых услуг.
- Максимальная мощность, глубина воздействия и эффективность от проведения процедуры среди всех аппаратов РУВТ.
- Полная функциональность аппарата уже в базовой комплектации.
- Стойкий эффект и долговременность удержания полученных результатов лечения
- Альтернатива хирургическому лечению

Масляный компрессор на 8 бар с накопителем. Нет необходимости в постоянной работе компрессора при работе аппарата, что с одной стороны увеличивает надёжность всей системы, с другой – уменьшает шумность и повышает комфорт при работе. Максимальная эффективность во всех диапазонах устанавливаемых параметров процедуры для максимально быстрого эффекта с первой процедуры.

Единственный в мире аппарат УВТ с функцией автоматического нарастания силы удара в начале процедуры до заданного уровня для привыкания и лучшей переносимости пациентом. Выводит комфорт пациента при проведении процедуры на качественно новый, недоступный ранее уровень. Резко снижается болезненность проведения процедуры. Возможность с первой процедуры безболезненно устанавливать более высокие значения энергии для максимально быстрого эффекта с самого начала лечения.

Единственная в мире серия аппаратов с автоматической подстройкой параметров процедуры в зависимости от болезненных ощущений пациента перед процедурой. Это позволяет экономить время врача и делает проведение процедуры простой и эффективной как для начинающих специалистов в области УВТ так и для опытных специалистов.

Уже в базовой комплектации аппарата, - аппаратная тележка (с профилированным ящиком для принадлежностей, усиленной станиной, дизайн [Gymna Elite](#)).

Программное обеспечение Gymna GTS 2 на русском языке: встроенные программы по заболеваниям с предустановленными параметрами процедуры и подробным поэтапным описанием проведения. Возможность выбора программ по частям тела, по типу обрабатываемой ткани (мышцы, сухожилия и т.д.), отдельные программы для триггерных точек с поэтапным описанием, урологии и т.д.



ООО «Гимна РУС»
Москва, 8-ая улица Текстильщиков, д.11
+7 (495) 377-76-25
www.gymnarus.ru