

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ

Анти-целлюлитная концепция

8-недельная программа

А. Измерение (перед началом лечения, через 4 недели, через 8 недель)

1. Cell-Meter: определение стадии целлюлита и контроль после терапии



2. Структура тела:

- % жировой ткани
- масса жира, кг
- масса без жира, кг
- мышечная масса, кг
- общее количество воды, %
- внеклеточная жидкость, %
- внутриклеточная жидкость, %
- индекс массы тела
- базальный метаболический уровень, кг

3. Фото



До

После

До

После

В. Лечение

Стадия целлюлита	АВТ с ShockMaster®	Beautyvibe®	Гель для тела
0	---	3 раза в неделю	Раз в день
1	Раз в неделю	2 раза в неделю	Раз в день
2	Раз в неделю	2 раза в неделю	Раз в день
3	2 раза в неделю	3 раза в неделю	2 раза в день
4	2 раза в неделю	3 раза в неделю	2 раза в день

Стадия 0 = нет целлюлита

Стадия 1 = первичный целлюлит, видимый только при помощи Cell-Meter®

Стадия 2 = легкая узловатость на поверхности кожи, позитивный тест-щипок

Стадия 3 = кожа гладка при лежании, но при вставании появляется видимость «апельсиновой корки»

Стадия 4 = проявление «апельсиновой корки» и при лежании, и при стоянии.

ПРОТОКОЛ ЛЕЧЕНИЯ

Анти-целлюлитная концепция

1. Акустическая волновая терапия с ShockMaster 300, 500

А. Лечение:

Стадия 1 + 2: Давление 2 - 3 бара
Частота 10 - 15 Гц

Стадия 3 + 4: Давление 3 - 3,5 бара
Частота 10 - 15 Гц



- D-ACTOR I ø20 мм
- 2500 - 3500 импульсов на каждую область лечения
- Используйте достаточное количество геля для обеспечения наилучшей передачи энергии
- Мягко надавливайте на аппликатор и удерживайте его вертикально коже.
- Пожалуйста, следите за тем, чтобы головка аппликатора полностью касалась кожи.
- перемещайте аппликатор круговыми движениями, первую половину общего количества импульсов передавайте вертикально, вторую - горизонтально.
- Распределяйте общее количество импульсов равномерно по всей области лечения (15 x 25 см)

В. Области лечения при целлюлите:

Область лечения = 15 x 25 см



ShockMaster
The proven solution

антицеллюлитная концепция

С. Основные условия:

1. Всегда соблюдайте 3-дневный перерыв между процедурами.
2. Уровень энергии необходимо подбирать в соответствии с уровнем чувствительности пациента к боли. Пациенты демонстрируют значительное повышение чувствительности за 2-3 дня до менструации. Во время этого периода уровень энергии должен быть адаптирован.

Д. Совет: ежедневно ± 2 литра воды или зеленого чая

Е. АВТ не должна проводиться в случаях (см. инструкцию):

- беременность
- почечная или печеночная недостаточность
- флебит или глубокий венозный тромбоз на ногах
- венозная хирургия на ногах / склеротерапия
- пациенты с карциномой
- сахарный диабет

2. Укрепляющий гель для похудения

Стадия 0,1 и 2: 1 раз в день (вечером)

Стадия 3 и 4: 2 раза в день (утром и вечером)

