

Программы ShockMaster 500 и ShockMaster 300

Список программ по показаниям и целям лечения	Число шагов	Параметры УВТ	Головки	Число программ	
ТТ локоть	8	3 бар 10 Гц 600 имп.	Фокусирующая		1
		1,6 бар 10 Гц 600 имп.	Красная лучевая 15 мм	1	2
ТТ поясница	5	2,2 бар 12 Гц 600 имп.	Красная лучевая 15 мм	2	3
		1,4 бар 12 Гц 600 имп.	Глубокого воздействия		4
ТТ шея	7	1,6 бар 8 Гц 600 имп.	Красная лучевая 15 мм	3	5
Ахиллотендинит, (под)острый	2	1,6 бар 17 Гц 2000 имп.	D-Actor 20		6
Болезненность в икрах	3	2 бар 10 Гц 600 имп.	Красная лучевая	4	
		2 бар 10 Гц 600 имп.	15 мм		7
Болезненность в квадрицепсах	2	2,2 бар 15 Гц 2500 имп.	D-Actor 20 D-Actor 35		8
Болезненность задних мышц бедра	2	2,2 бар 15 Гц 2500 имп.	D-Actor 20		9
Болезнь Шляттера	3	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	5	10
Боль в большом вертеле бедренной кости	4	3 бар 5 Гц 2500 имп.	Глубокого воздействия		11
		3,6 бар 5 Гц 2500 имп.	Красная лучевая 15 мм	6	12
Боль в области латерального надмышелка: мышца	4	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	7	13
Боль в области латерального надмышелка: сухожилие	6	1,8 бар 10 Гц 2300 имп.	Красная лучевая 15 мм	8	14
		4 бар 10 Гц 2300 имп.	Фокусирующая		15
Боль в области латерального надмышелка: сухожилие/мышца	4	1,8 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	9	16
Гипертонус икроножных мышц	3	2 бар 8 Гц 600 имп.	Красная лучевая 15 мм	10	17
Застарелая рубцовая ткань	1	1,2 бар 10 Гц 500 имп.	Красная лучевая 15 мм	11	18
		4 бар 10 Гц 500 имп.	Фокусирующая		19
Инфрателлярная тендинопатия	6	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	12	20
Инфрателлярная тендинопатия с кальцификацией	6	2 бар 5 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	13	21
Колено прыгуна	3	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	14	22
Перонеальная тендинопатия	4	1,6 бар 10 Гц 600 имп.	Красная лучевая 15 мм	15	23
Плантарный фасциит	4	2 бар 10 Гц 3500 имп.	Красная лучевая 15 мм	16	24
Плантарный фасциит с пяточной шпорой	4	2 бар 5 Гц 2400 имп.	Глубокого воздействия		25
		2,8 бар 5 Гц 2400 имп.	Красная лучевая 15 мм	17	26
Расколота голень / передний большеберцовый синдром	3	1,6 бар 15 Гц 4500 имп.	Красная лучевая 15 мм	18	27
		3 бар 15 Гц 4500 имп.	Фокусирующая		28
Синдром замороженного плеча (адгезивный капсулит)	4	1,6 бар 10 Гц 600 имп.	Красная лучевая 15 мм	19	29
Синдром запястного канала	1	2 бар 5 Гц 2000 имп.	Красная лучевая 15 мм	20	30
		4 бар 5 Гц 2000 имп.	Фокусирующая		31

Синдром трения илиотибиального тракта	5	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	21	32
			15 мм		
Спастичность верхней конечности	4	1,4 бар 10 Гц 1000 имп.	Красная лучевая	22	33
			15 мм		
Спастичность мышц нижней конечности (подошвенное сгибание лодыжки)	3	2 бар 10 Гц 1500 имп.	Красная лучевая	23	34
			15 мм		
Спастичность мышц нижней конечности после церебрального паралича	3	0,6 бар 8 Гц 1500 имп.	Красная лучевая	24	35
		1 бар 8 Гц 1500 имп.	Фокусирующая		36
Супрапателлярная тендинопатия	3	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	25	37
		4 бар 10 Гц 2000 имп.	Фокусирующая		
Тендинопатия ахиллова сухожилия. Точка прикрепления	4	3 бар 10 Гц 2000 имп.	Фокусирующая	26	39
		1,8 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая		40
Тендинопатия ахиллова сухожилия. Средняя часть.	4	2 бар 8 Гц 4000 имп.	Красная лучевая	27	41
			15 мм		
Тендинопатия ахиллова сухожилия с кальцификацией. (средняя часть)	4	2,2 бар 5 Гц 4000 имп.	Красная лучевая	28	42
			15 мм		
Тендинопатия двуглавой мышцы	3	2,2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	29	43
			15 мм		
Тендинопатия надкостной мышцы	4	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	30	44
		1,2 бар 10 Гц 2000 имп.	Глубокого воздействия		
Тендинопатия надкостной мышцы с кальцификацией	4	1,6 бар 5 Гц 2000 имп.	Глубокого воздействия	31	46
		2,4 бар 5 Гц 2000 имп.	Красная лучевая		
Тендинопатия подкостной мышцы	4	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	32	48
			15 мм		
Тендинопатия подлопаточной мышцы	3	2 бар 10 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	33	49
			15 мм		
Тендинопатия приводящих мышц	2	1,7 бар 17 Гц 2000 имп.	D-Actor 20		50
Тендинопатия середины бедра	4	2,8 бар 5 Гц 2500 имп.	Красная лучевая	34	51
			15 мм		
ТТ колена	5	2,6 бар 10 Гц 600 имп.	Красная лучевая	35	52
		2 бар 10 Гц 600 имп.	Глубокого воздействия		
Указательный палец	1	1,8 бар 5 Гц 2000 имп.	Красная лучевая	36	54
		4 бар 5 Гц 2000 имп.	Фокусирующая		
Эпикондилит медиальный: надкостничное сухожилие	3	1,8 бар 10 Гц 2000 имп.	Фокусирующая	37	56
		1 бар 10 Гц 2000 имп	Красная лучевая		
Эректильная дисфункция	1	1 бар 10 Гц 1500 имп	Красная лучевая	38	58
		2 бар 10 Гц 1500 имп	Фокусирующая		

59+38 с другой головкой,
и соответственно,
с другим эффектом
 $\Sigma=97$