

Список программ по целям и показаниям серии 400

Электротерапия

Цель лечения	Уточнение цели лечения				№ п/п	
Уменьшение боли	Воротной контроль боли	Обычный ЧЭНС		Традиционная ЭТ	1	
				Последовательная ЭТ	2	
		Случайный по частоте ЧЭНС			3	
	Высвобождение опиоидов	Низкочастотный ЧЭНС		Традиционная ЭТ	4	
				Последовательная ЭТ	5	
		Высокочастотный ЧЭНС		Традиционная ЭТ	6	
				Последовательная ЭТ	7	
		Пачки импульсов ЧЭНС			8	
Хан Стим			9			
Снижение мышечного тонуса	Мягкое снижение тонуса		Традиционная ЭТ		10	
			Последовательная ЭТ		11	
	Нормальное снижение тонуса		Традиционная ЭТ		12	
			Последовательная ЭТ		13	
	Уменьшение спастичности		Традиционная ЭТ		14	
			Последовательная ЭТ		15	
Тренировка мышц	Профилактика атрофии			Традиционная ЭТ		16
				Последовательная ЭТ		17
	Лечение атрофии	Выраженная		Традиционная ЭТ		18
				Последовательная ЭТ		19
		Незначительная		Традиционная ЭТ		20
				Последовательная ЭТ		21
	Специфические мышечные функции	Выносливость		Очень слабая	Традиционная ЭТ	22
					Последовательная ЭТ	23
				Слабая	Традиционная ЭТ	24
					Последовательная ЭТ	25
		Абсолютная сила		Очень слабая	Традиционная ЭТ	26
					Последовательная ЭТ	27
				Слабая	Традиционная ЭТ	28
					Последовательная ЭТ	29
		Взрывная сила		Очень слабая	Традиционная ЭТ	30
					Последовательная ЭТ	31
				Слабая	Традиционная ЭТ	32
					Последовательная ЭТ	33
		Анаэробная сила		Очень слабая	Традиционная ЭТ	34
					Последовательная ЭТ	35
				Слабая	Традиционная ЭТ	36
					Последовательная ЭТ	37
	Улучшение контроля мышц					38
	Реабилитация мышц таза	Выраженное недержание		Традиционная ЭТ		39
				Последовательная ЭТ		40
		Умеренное недержание		Традиционная ЭТ		41
				Последовательная ЭТ		42
		Недержание при позыве		Традиционная ЭТ		43
				Последовательная ЭТ		44
		Смешанное недержание		Традиционная ЭТ		45
				Последовательная ЭТ		46
		Выраженный гипертонус мышц		Традиционная ЭТ		47
				Последовательная ЭТ		48
	Умеренный гипертонус мышц		Традиционная ЭТ		49	
			Последовательная ЭТ		50	
	Денервация	Треугольные импульсы				51
		Прямоугольные импульсы				52
	Спорт	Выносливость	Тренировка мышц	Уровень 1		53

				(низкая интенсивность)	
				Уровень 2	54
				Уровень 3	55
				Уровень 4	56
				Уровень 5	57
				(высокая интенсивность)	
			Нижние конечности	Уровень 1 (низкая интенсивность)	58
				Уровень 2	59
				Уровень 3	60
				Уровень 4	61
				Уровень 5 (высокая интенсивность)	62
		Абсолютная сила	Верхние конечности + туловище	Уровень 1 (низкая интенсивность)	63
				Уровень 2	64
				Уровень 3	65
				Уровень 4 (высокая интенсивность)	66
			Нижние конечности	Уровень 1 (низкая интенсивность)	67
				Уровень 2	68
				Уровень 3	69
				Уровень 4 (высокая интенсивность)	70
		Взрывная сила	Верхние конечности + туловище	Уровень 1 (низкая интенсивность)	71
				Уровень 2	72
				Уровень 3	73
				Уровень 4 (высокая интенсивность)	74
			Нижние конечности	Уровень 1 (низкая интенсивность)	75
				Уровень 2	76
				Уровень 3	77
				Уровень 4 (высокая интенсивность)	78
		Анаэробная сила	Верхние конечности + туловище	Уровень 1 (низкая интенсивность)	79
				Уровень 2	80
				Уровень 3	81
				Уровень 4	82
				Уровень 5 (высокая интенсивность)	83
			Нижние конечности	Уровень 1 (низкая интенсивность)	84
				Уровень 2	85
				Уровень 3	86
				Уровень 4	87
				Уровень 5 (высокая интенсивность)	88
		Активное восстановление	Верхние конечности + туловище		89
			Нижние конечности		90
		Капилляризация	Верхние конечности + туловище		91
			Нижние конечности		92
Трофическое состояние	Поверхностная ткань	Традиционная ЭТ		93	
		Последовательная ЭТ		94	
	Мышечная ткань	Традиционная ЭТ		95	
		Последовательная ЭТ		96	
	Через симпатическую нервную систему		Традиционная ЭТ		97

		Последовательная ЭТ	98
	Уменьшение локальной отёчности		99
Ускоренное восстановление тканей	Воспалённая ткань	Обычный микроток	100
		Непрерывный микроток	101
	Рана кожи + инфекция	Обычный ток мА	102
		Непрерывный ток мА	103
		Обычный микроток	104
		Непрерывный микроток	105
	Восстановление соединительной ткани	Обычный ток мА	106
		Непрерывный ток мА	107
		Обычный микроток	108
		Непрерывный микроток	109
	Заживление перелома	Обычный ток мА	110
		Непрерывный ток мА	111
		Обычный микроток	112
		Непрерывный микроток	113
Повторные нарушения	Активное восстановление	Верхняя часть тела	114
		Нижняя часть тела	115
	Капиляризация	Верхняя часть тела	116
		Нижняя часть тела	117
	Дренаж	Уровень 1	118
		Уровень 2	119
	Васкуляризация	Уровень 1	120
		Уровень 2	121
Улучшение повседневной активности	Улучшение активного движения		122
	Улучшение подвижности суставов		123
	Улучшение походки		124
	Улучшение гладких мышц		125
Электрофорез	Снижение воспаления	Дексаметазон	126
		Гидрокортизон	127
		Салицилаты	128
	Противогрибковый	Медь	129
		Цинк	130
	Противовирусный		131
	Снижение потоотделения		132
	Локальная анестезия	Лидокаин	133
		Прокаин	134
	Улучшение циркуляции	Гистамин	135
		Ксантинола-никотинат	136
	Поверхностная контрактура	Йод	137
		Хлор	138
		Гиалуронидаза	139
	Против отложения уратов		140
	Против отложения кальция		141

Показание ЭТ	Детализация	№ п/п
Акроцианоз	Интенсивный локальный	1
	Среднесеgmentальный	2
	Специфические точки	3
Артериосклероз	Интенсивный локальный	4
	Среднесеgmentальный	5
	Специфические точки	6
Артралгия	Локальная	7
	Локальная + региональная	8
	Специфические точки	9
Артралгия (ЭФ)		10
Артрит (ЭФ)	Острый	11
	Подострый	12
Артроз	Локальный	13
	Локальный + региональный	14
	Специфические точки	15
Атрофия	Выраженная атрофия	16
	Незначительная атрофия	17
	Профилактика атрофии	18
Болезнь Бюргера	Интенсивный локальный	19
	Среднесеgmentальный	20
	Специфические точки	21
Болезнь Де Кервена (ЭФ)	Острая стадия	22
	Подострая стадия	23
Болезнь Рейно	Интенсивный локальный	24
	Среднесеgmentальный	25
	Специфические точки	26
Боль в пояснице	Острая	27
	Подострая	28
	Хроническая	29
	Дискогенная	30
Брахиалгия	Острая	31
	Подострая	32
	Хроническая	33
Бурсит	Острый	34
	Подострый	35
	Воспалённая ткань	36
Вирусная инфекция (ЭФ)		37
Герпес Вайтлоу (ЭФ)		38
Герпес простой (ЭФ)		39
Гиперактивность мочевого пузыря		40
Гипергидроз	Электротерапия (постоянный ток)	41
	Электрофорез (ЭФ)	42
Гипертонус мышц	Подострый	43
	Хронический	44
Головная боль от напряжения		45
Гонартроз	Подострый	46
	Хронический	47
Грибковые инфекции (ЭФ)		48
Дисменорея	Острая	49
	Подострая	50
Дистрофия Зюдека	Острая сегментарная	51
	Подострая региональная	52
	Хроническая центральная	53
	Ускорение восстановления тканей	54
Дисфункция мышц таза	Очень слабые мышцы	55
	Слабые мышцы	56

	Восстановление мышечного тонуса	57
	Мышечное истощение	58
Замороженное плечо	Подострая стадия	59
	Хроническая стадия	60
	Воспаление ткани	61
Зубная боль		62
Ишемические раны	Предпочтительно (микротоки)	63
	Альтернатива	64
Ишиас	Острый	65
	Подострый	66
	Хронический	67
Коксартроз	Подострый	68
	Хронический	69
Контрактуры	Подострые	70
	Хронические	71
Контрактуры (ЭФ)		72
Люмбалгия	Острая	73
	Подострая	74
	Хроническая	75
	Интерференция, шаг 1	76
	Интерференция, шаг 2	77
Миалгия (ЭФ)		78
Миозит оссифицирующий (ЭФ)		79
Миофасциальные триггерные точки	Подострая стадия	80
	Хроническая стадия	81
Миофасциальные триггерные точки (ЭФ)	Подострая стадия	82
	Хроническая стадия	83
Невралгия	Острая	84
	Подострая	85
	Хроническая	86
Невралгия (ЭФ)	Подострая	87
	Хроническая	88
Недержание	Стресс недержание 1 уровня	89
	Стресс недержание 2 уровня	90
	Острое недержание	91
	Смешанное недержание	92
Неспецифическая боль позвоночника		93
Опоясывающий лишай	Острый	94
	Подострый	95
	Улучшить заживление кожи	96
Болезнь Осгуда Шлаттера	Воспалённая ткань	97
	Облегчение симптоматической боли	98
Отёк	Главное	99
	После травмы: предпочтение	100
	После травмы: альтернатива	101
Отёк (ЭФ)		102
Отложение кальция (ЭФ)		103
Переломы	Предпочтительно (микротоки)	104
	Альтернатива	105
Плечевой периаартрит	Ускорение восстановления тканей	106
	Облегчение симптоматической боли	107
Падагрический артрит (ЭФ)		108
Послеоперационная слабость		109
Посттравматическая дистрофия	Острая	110
	Подострая	111
	Хроническая	112
	Ускорение восстановления тканей	113
Постхирургические боли	Острые	114
	Подострые	115

	Ускорение восстановления тканей	116
Пролежни	Наличие инфекции/некроз	117
	Без инфекции	118
	Ускорение заживления кожи	119
Пролежни (ЭФ)		120
Пульсирующая боль		121
Пяточный фасцит (ЭФ)	Электротерапия (микротоков)	122
	Электрофорез (ЭФ)	123
Разрыв мышц	Предпочтительно (микротоков)	124
	Альтернатива	125
Растяжение	Подострое	126
	Хроническое	127
	Ускорение восстановления тканей	128
Ревматические заболевания (ЭФ)		129
Рубцовая ткань (ЭФ)		130
Рубцы (ЭФ)		131
Синдром сдавленной голени	Электротерапия (микротоков)	132
	Электрофорез (ЭФ)	133
Слабые мышцы живота		134
Спастика	Детонизация	135
	Взаимное угнетение	136
Тендинит	Локальный + региональный	137
	Улучшение заживления сухожилий	138
Тендинит (ЭФ)	Острый	139
	Подострый	140
	Хронический	141
Тендинопатия ахиллова сухожилия		142
Тендосиновит	Предпочтительно (микротоков)	143
	Альтернатива	144
Туннельный синдром запястья	Фаза 1	145
	Фаза 2	146
Фантомные боли	Острые	147
	Хронические	148
Целлюлит	Активация подкожных мышц	149
	Снижение жировой ткани	150
	Воспалённая ткань	151
Шейно-головной синдром	Подострый	152
	Хронический	153
Шейно-плечевой синдром	Острый	154
	Подострый	155
	Хронический	156
Эпикондилит	Локальный + региональный	157
	Улучшение заживления сухожилий	158
Эпикондилит (ЭФ)	Острый	159
	Подострый	160
	Хронический	161
Язвы голени	Наличие инфекции	162
	Без инфекции	163
	Хронический	164
	Улучшение заживления кожи	165
Язвы голени (ЭФ)		166

Ультразвуковая терапия

Цель лечения	Уточнение цели лечения		№ п/п
Трофическое состояние (Улучшение трофики)	Тендинит	Подострый	1
		Хронический	2
	Повреждение связок	Подострое	3
		Хроническое	4
	Повреждение мышц	Подострое	5
		Хроническое	6
	Костно-хрящевые повреждения		7
	Нейрогенные повреждения		8
	Контрактуры	Поверхностная контрактура	9
		Частичная контрактура сустава	10
Ускорение восстановления тканей	Острое поражение сустава		11
	Острое мышечное повреждение		12
	Острое нейрогенное повреждение		13
	Заживление перелома		14
Фонофорез			15

Показание для УЗТ	Уточнение стадии и локализации		№ п/п
Артроз	Подострый	1	
	Хронический	2	
Болезнь Бехтерева		3	
Бурсит		4	
Замороженное плечо		5	
Контрактуры	Поверхностная	6	
	Глубокая	7	
Контрактура Дюпюитрена		8	
Миалгия		9	
Невропатия		10	
Переломы		11	
Посттравматические заболевания	Острая стадия	12	
	Подострая стадия	13	
Пролежни		14	
Растяжение	Острая стадия	15	
	Подострая стадия	16	
Рубцовая ткань	Острая стадия	17	
	Подострая стадия	18	
Тендинит	Подострая стадия	19	
	Хроническая стадия	20	
Эпикондилит	Подострая стадия	21	
	Хроническая стадия	22	
Язвы голени		23	

Комбинированная терапия

Показание ЭТ	Детализация	№ п/п
Артроз	Подострый	1
	Хронический	2
	Специфические точки	3
Контрактуры	Поверхностная	4
	Глубокая	5
Миофасциальные триггерные точки	Подострая стадия	6
	Хроническая стадия	7
Невропатия		8
Растяжение	Острая стадия	9
	Подострая стадия	10
Тендинит	Подострая стадия	11
	Хроническая стадия	12
Эпикондилит	Подострая стадия	13
	Хроническая стадия	14

Лазерная терапия

Цель лечения	Уточняем цель лечения		№ п/п
Ускорение восстановления тканей	Повреждение кожи	Небольшое 	1
		Небольшое 	2
		Большое 	3
		Большое 	4
	Поражение сустава	Острое, глубина 0,5 см 	5
		Острое, глубина 0,5 см 	6
		Острое, глубина 1,0 см 	7
		Подострое, глубина 0,5 см 	8
		Подострое, глубина 0,5 см 	9
		Подострое, глубина 1,0 см 	10
	Повреждение мышц	Острое, глубина 0,5 см 	11
		Острое, глубина 0,5 см 	12
		Острое, глубина 1,0 см 	13
		Подострое, глубина 0,5 см 	14
		Подострое, глубина 0,5 см 	15
		Подострое, глубина 1,0 см 	16
	Повреждение сухожилия	Острое, глубина 0,5 см 	17
		Острое, глубина 0,5 см 	18
		Острое, глубина 1,0 см 	19
		Подострое, глубина 0,5 см 	20
		Подострое, глубина 0,5 см 	21
		Подострое, глубина 1,0 см 	22
	Нейрогенные повреждения	Острое, глубина 0,5 см 	23
		Острое, глубина 0,5 см 	24
		Острое, глубина 1,0 см 	25
		Подострое, глубина 0,5 см 	26
		Подострое, глубина 0,5 см 	27
		Подострое, глубина 1,0 см 	28
Уменьшение боли	Миогенные точки боли	Глубина 0,5 см 	29
		Глубина 0,5 см 	30
	Нейрогенные точки боли	Глубина 0,5 см 	31
		Глубина 0,5 см 	32

Показание лазерная терапия	Детализация	№ п/п
Артрит	Острый, глубина 0,5 см 	1
	Острый, глубина 0,5 см 	2
	Острый, глубина 1,0 см 	3
	Подострый, глубина 0,5 см 	4
	Подострый, глубина 0,5 см 	5
	Подострый, глубина 1,0 см 	6
Болезнь Де Кервена	Острый 	7
	Острый  +	8
	Подострый 	9
	Подострый 	10
Бурсит	Острый, глубина 0,5 см 	11
	Острый, глубина 0,5 см 	12
	Острый, глубина 1,0 см 	13
	Подострый, глубина 0,5 см 	14
	Подострый, глубина 0,5 см 	15
	Подострый, глубина 1,0 см 	16
Герпес простой	Малая поверхность 	17
	Малая поверхность 	18

	Большая поверхность 	19
	Большая поверхность 	20
Миалгия	Малая поверхность 	21
	Малая поверхность 	22
	Большая поверхность 	23
	Большая поверхность 	24
Миофасциальные триггерные точки	Острый, глубина 0,5 см 	25
	Острый, глубина 1,0 см 	26
	Подострый, глубина 0,5 см 	27
	Подострый, глубина 1,0 см 	28
Невралгия	Острый, глубина 0,5 см 	29
	Острый, глубина 1,0 см 	30
	Подострый, глубина 0,5 см 	31
	Подострый, глубина 1,0 см 	32
Посттравматические заболевания	Острый, глубина 0,5 см 	33
	Острый, глубина 0,5 см 	34
	Острый, глубина 1,0 см 	35
	Подострый, глубина 0,5 см 	36
	Подострый, глубина 0,5 см 	37
	Подострый, глубина 1,0 см 	38
Пролежни	Малая поверхность 	39
	Малая поверхность 	40
	Большая поверхность 	41
	Большая поверхность 	42
Растяжение	Острый, глубина 0,5 см 	43
	Острый, глубина 0,5 см 	44
	Острый, глубина 1,0 см 	45
	Подострый, глубина 0,5 см 	46
	Подострый, глубина 0,5 см 	47
	Подострый, глубина 1,0 см 	48
Ревматоидный артрит	Острый, глубина 0,5 см 	49
	Острый, глубина 0,5 см 	50
	Острый, глубина 1,0 см 	51
	Подострый, глубина 0,5 см 	52
	Подострый, глубина 0,5 см 	53
	Подострый, глубина 1,0 см 	54
Рубцовая ткань	Малая поверхность 	55
	Малая поверхность 	56
	Большая поверхность 	57
	Большая поверхность 	58
Тендинит	Острый, глубина 0,5 см 	59
	Острый, глубина 1,0 см 	60
	Подострый, глубина 0,5 см 	61
	Подострый, глубина 1,0 см 	62
Целлюлит	Малая поверхность 	63
	Малая поверхность 	64
	Большая поверхность 	65
	Большая поверхность 	66
Эпикондилит	Острый 	67
	Подострый 	68
Язвы голени	Малая поверхность 	69
	Малая поверхность 	70
	Большая поверхность 	71
	Большая поверхность 	72